

## 检测注意事项

智能中医经络检测仪在测量前或测量过程中，尤其需要注意几个事宜，否则可能导致测量无法进行或测量出错。

- 1、测量前，测量者不宜有过量运动或亢奋情绪，如有以上状态，请先平复状态到常规指标再做测量，否则会影响测量准确性
- 2、检测前，不宜有喝酒、咖啡、浓茶，吃保健品、服用药物等易引起身体状态亢奋的行为，否则会影响测量准确性
- 3、测量者的手指要保持常规体温，手指温度不能太冷，否则信号采集器无法检测信号。宜先暖暖手再作测量
- 4、测量者的手指不能沾水或有其它异物，否则会影响信号采集
- 5、测量者的手指涂有指甲油或指甲油过厚，会影响信号采集
- 6、测量者的手指有伤疤或有厚茧，会影响信号采集
- 7、测量宜在半空腹状态下进行
- 8、测量过程中，测量者切勿随意晃动身体或摇头摆脑，须在整個测量期间保持身体端坐或正立，自然放松
- 9、测量过程中，测量的手指在信号采集器中不能乱动，否则会影响信号采集
- 10、女性生理期及生理期前后一两天，身体有应激状态，不宜测量
- 11、测量完成时，如果测量页面出现问题反馈，测量者须如实回答当前身体状态（如身体处于某种应激状态，则检测报告会规避部分由于应激态出现的具有偏差的测量数据，避免造成测量误判）
- 12、通常建议测量常用手，但是另一只手也完全可以测量，同样具有参考意义。

## 关于智能经络健康检测仪产品特性的说明

- 1、本检测仪以中医理论体系为支撑，产品技术核心是中医“血气共振”理论奠基者王唯工教授提出的“血气共振”理论及中医十二经络谐波模型
- 2、本检测仪提供一种通过中医理论研究基础为用户把脉检测身体状态的用途
- 3、本检测仪检测数据为人体实时体征数据信息，数据特征为常规性身体状态表象
- 4、本检测仪检测数据受人体检测当时的应激状态、生理状态、情绪状态等影响，比如检测之前有喝酒、喝茶、喝咖啡等行为，较高耗能运动行为等
- 5、本检测仪主要功能是通过检测数据为用户了解自我身体状态健康趋势提供参考，并通过检测结论为用户养生理疗、保健强身、日常健康合理饮食等提供有价值的建议，避免疾病风险